


STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽITÍ KAZETY PRO ANTIGENNÍ TEST SARS-CoV-2 – SINGLE TUBE

1. Umístěte extrakční zkumavku na pracovní destičku.




2. Odlomte víčko tuby s extrakčním činidlem a celý obsah přelejte do připravené extrakční tuby

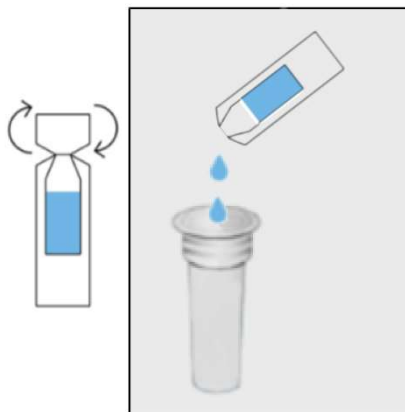


3. Vložte přiložený tampon do nosní dírky 1 - 1,5 cm hluboko. Přitlačte nosní díрку k tamponu a jemně jím 3x otočte, aby bylo zajištěno dostatečné množství materiálu na tampon.



4. Umístěte tampon do připravené extrakční zkumavky a několikrát s ním zatočte.

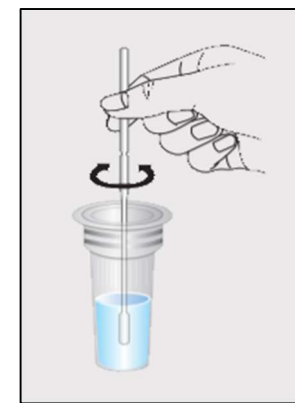


5. Tampon vyjměte za stálého jemného stlačování hlavy tamponu tak, aby se tekutina z něj vyždímala do extrakční zkumavky

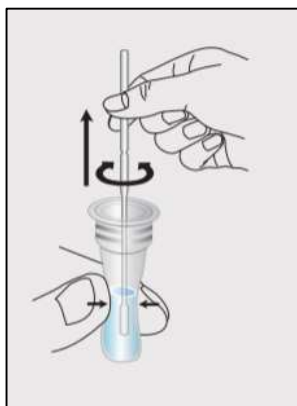

6. Extrakční zkumavku s roztokem opatrně zavřete přiloženým víčkem s filtrem



7. Zkumavku s extrakčním roztokem otočte a jemně z ní vytlačte 3 kapky do jamky pro vzorek (S) v testovací kazetě,

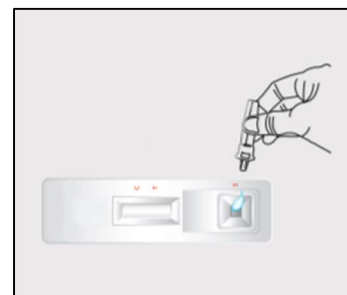

8. Odečtěte výsledek po 15 minutách. Pokud jste jej neodečetli po 20 minutách nebo déle, je výsledek neplatný a doporučuje se test opakovat.

