



Roztok pro uchovávání vzorků

Katalogové číslo:

P042T0020100

Název produktu:

Obecný název: roztok pro uchovávání vzorků

Balení

36 testů/balení (0.2ml/zkumavka) , 36 testů/balení (0.5ml/zkumavka) , 36 testů/balení (1.0ml/zkumavka) ,
36 testů/balení (1.5ml/zkumavka) , 36 testů/balení (2.0ml/zkumavka) , 36 testů/balení (2.5ml/zkumavka) ,
36 testů/balení (3.0ml/zkumavka) 48 testů/balení (0.2ml/zkumavka) , 48 testů/balení (0.5ml/zkumavka) ,
48 testů/balení (1.0ml/zkumavka) , 48 testů/balení (1.5ml/zkumavka) , 48 testů/balení (2.0ml/zkumavka) ,
48 testů/balení (2.5ml/zkumavka) , 48 testů/balení (3.0ml/zkumavka) 50 testů/balení (0.2ml/zkumavka) ,
50 testů/balení (0.5ml/zkumavka) , 50 testů/balení (1.0ml/zkumavka) , 50 testů/balení (1.5ml/zkumavka) ,
50 testů/balení (2.0ml/zkumavka,) , 50 testů/balení (2.5ml/zkumavka) , 50 testů/balení (3.0ml/zkumavka)
52 testů/balení (0.2ml/zkumavka) , 52 testů/balení (0.5ml/zkumavka) , 52 testů/balení (1.0ml/zkumavka) ,
52 testů/balení (1.5ml/zkumavka) , 52 testů/balení (2.0ml/zkumavka,) , 52 testů/balení (2.5ml/zkumavka) ,
52 testů/balení (3.0ml/zkumavka) 81 testů/balení (0.2ml/zkumavka) , 81 testů/balení (0.5ml/zkumavka) ,
81 testů/balení (1.0ml/zkumavka) , 81 testů/balení (1.5ml/zkumavka) , 81 testů/balení (2.0ml/zkumavka,) ,
81 testů/balení (2.5ml/zkumavka) , 81 testů/balení (3.0ml/zkumavka) 96 testů/balení (0.2ml/zkumavka) ,
96 testů/balení (0.5ml/zkumavka) , 96 testů/balení (1.0ml/zkumavka) , 96 testů/balení (1.5ml/zkumavka) ,
96 testů/balení (2.0ml/zkumavka,) , 96 testů/balení (2.5ml/zkumavka) , 96 testů/balení (3.0ml/zkumavka)
100 testů/balení (0.2ml/zkumavka) , 100 testů/balení (0.5ml/zkumavka) , 100 testů/balení (1.0ml/zkumavka) ,
100 testů/balení (1.5ml/zkumavka) , 100 testů/balení (2.0ml/zkumavka,) , 100 testů/balení (2.5ml/zkumavka) ,
100 testů/balení (3.0ml/zkumavka)

Zamýšlené použití

Tato souprava se používá k uchovávání tkání a cytopatologických vzorků.

Princip

Hlavními složkami konzervačního roztoku jsou guanidinová sůl, povrchově aktivní látka, pufr atd. Tato souprava může inaktivovat patogeny, jako jsou viry a bakterie ve vzorcích, inhibovat aktivitu nukleázy a stabilizovat DNA/RNA v patogenech a v lidských buňkách. Uchovávání výtěrů z nosu, výtěrů z krku a sputa v tomto roztoku je přínosem pro následnou analýzu nukleových kyselin.

Hlavní složky

Guanidinium isothiokyanát, N-lauroylsarkosin sodný, trihydrát octanu sodného, kyselina octová, voda atd.

Skladovací podmínky a expirace

Expirace: 2 roky

Skladovací podmínky: pokojová teplota

Použitelné vzorky

Použitelné typy vzorků: výtěry z nosu, výtěry z krku, sputum.

Skladování a transport: Pokud vzorky nemohou být okamžitě zpracovány, měly by být uchovávány při -20 až -80 °C. Aby se předešlo opakovanému zmrazování a rozmrazování, měly by být vzorky transportovány při 0 ~ 8 °C.


Základní informace



Jinagsu Mole Bioscience Co.,Ltd.

Adresa: 6.patro, G116 Building, No.805, Jianshang Avenue, Medical New&Hi-tech District, Taizhou,
Jiangsu Province, Čína

tel: +86 571 87209306
e-mail : sales@molechina.com
web : www.molechina.com

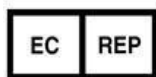

SUNGO Europe B.V.

Adresa : Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Nizozemí

Tel/Fax : +31 (0) 2021 11106
e-mai : ec.rep@sungogroup.com

Datum výroby a datum expirace: viz štítek

Index of Symbols			
	Přečtěte si návod k použití		Testů na kit
	Nepoužívejte opakovaně		Spotřebujte do
	Nepoužívejte, pokud je obal poškozen		Šarže
	Katalogové číslo		Výrobce
		Zplnomocněný zástupce	

